

Kromoglass 3

**Skloionomerní
tmelicí
cement.
Mísitelný
vodou.**

**Water-mixable
glass ionomer
cement for
luting.**

LASCOD

CE 0546



LASCOD Spa - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto F.no (Firenze), Italy
tel. (+39) 055 421 57 68 (r.a.) - info@lascod.it - www.lascod.com

050004 - Rev. 06/2021 

Vodou mísitelný skloionomerní tmelící cement.

V souladu s ISO 9917-1. Pro profesionální použití ve stomatologii.

POUŽITÍ: trvalé tmelení můstků, korunek, inlejí, onlejí a ortodontických kroužků. Cementace keramických restaurací (silikátová keramika, keramika z oxidu zirkoničitého, keramika z oxidu hlinitého).

PREPARACE MÍSTA : Kromoglass 3 je extra jemný skloionomerní cement s mimořádnou přilnavostí na sklovinu a dentin. Pro docílení nejlepších výsledků, sklovina a dentinový povrch musí být vyčištěna a ne nadměrně vysušena, aby se zabránilo pooperační citlivosti. Důkladně vysušte povrchy určené k restaurování .

PREPARACE A POUŽITÍ CEMENTU : aspiračním kapátkem vpravte vodu do lahvičky, nejlépe destilovanou. Před použitím prášek protřepejte. Pro každou dávku prášku pomocí měrné lžičky použijte jednu kapku vody. Po použití lahvičku s práškem pečlivě uzavřete a z dávkovače odstraňte případné zbytky prášku. Při dávkování vody držte kapátko ve vzpřímené poloze. Nasypete prášek a vodu na skleněnou desku a pomocí plastové nebo kovové špachtle smíchejte prášek s vodou, počínaje malými porcemi, které se budou postupně zvětšovat. Přípravu provádějte při teplotě 23 +/- 1°C. Při různých teplotách použijte pro míchání skleněnou desku s teplotou mezi uvedenými teplotami. Při vyšších teplotách se doba zpracování zkracuje a při nižších teplotách se prodlužuje. Správné konzistence je dosaženo, když připravená směs stéká, avšak stále zůstává přilepená ke špachtli. Naneste hmotu na požadované místo s vynaložením mírné síly s ne příliš velkým množstvím cementu. Během nanášení a procesu tuhnutí dbejte na to, aby pracovní plocha zůstala suchá. Doporučuje se použití koferdamu. Po aplikaci Kromoglass 2 výplň ihned překryjte matricí z důvodu její citlivosti na vlhkost. Nepoužívat izolanty na dentin dokud se nedocílí požadovaný objem tmeleného cementu. Použité nástroje omýt vodou než na nich začne hmota tuhnout.

Poměr míchání	1,0 g vody na 3,3 - 3,8 g prášku
Doba míchání*	30" - 40"
Pracovní doba včetně míchání*	2'30" - 3'30"
Doba tuhnutí**	3'30" - 5'

* Čas měřen při 23+/-1°C. - ** Čas měřen při 37+/-1°C.

VAROVÁNÍ : produkt může způsobit poškození očí. Při použití používejte ochranné brýle, rukavice a oděv. Použijte před datem expirace a pro popsané aplikace. Nepoužívat při přecitlivosti na: fluorokřemčité sklo, kyselinu polyakrylovou, kyselinou vinnou. Jak je obecně známo pro skloionomerní cementy, produkt je mírně cytotoxický. Uchovávejte v chladu a suchu. Nepoužívejte pokud prášek agreguje.

OSTATNÍ SKLOIONOMERNÍ CEMENTY : Kromoglass 2 (výplňový cement).