

Temp Silicon Brush

Silikonové štětce na modelaci kompozit - TPEN | TPENS

(CZ) ČESKY

Silikonové štětce na modelaci kompozit

- Nelepí se na kompozit.
- Nezanechávají žádnou poréznost a umožňují kontrolu podobnou jako běžné modelační štětce používané na keramiku.
- Mají podobnou pružnost jako nezpolymerovaný kompozit: zamezují vytvoření vzduchových bublin, což umožňuje, aby každá vrstva materiálu byla dobře ztuhněna a vyhlazena.
- Snadno se čistí a dezinfikují: opláchněte veškeré zbytky z nástroje. Dezinfekční roztok lze použít v souladu s pokyny na štítku roztoku. Nástroje je vhodné čistit jednorázovým hadříkem a dezinfekčním roztokem (typ FD322 – DURR DENTAL) a nechat je 10 minut ponořené v antibakteriálním dezinfekčním roztoku (typ Peroxil nebo Vircon): Prodává se v nesterilním balení.
- Lze je použít i pro jiné účely: akryláty, monomery, epoxidové pryskyřice, tmely, maziva, kyanoakryláty, izolátory, gely, glazury, superbarvy.

TPENN
N1-N2-N3-N4-N5

Úvodní sada štětců TEMP malých černých tvrdých
5 kusů různého tvaru se špičkami ze silikonu pro modelaci kompozit.

TPENS
S1-S2-S3-S4-S5

Úvodní sada štětců TEMP malých bílých měkkých
5 kusů různého tvaru se špičkami ze silikonu pro modelaci kompozit



N1-S1

Krátká gumová špička tvaru špachtle ideální pro modelaci na okluzi.



N2-S2

Dlouhá pryžová špička tvaru špachtle ideální pro vrstvení a tvarování povrchů.



N3-S3

Kulatá pryžová špička plochá pro modelaci cervikálních oblastí.



N4-S4

Kónická pryžová špička ideální pro modelaci okluze.



N5-S5

Třístranná pryžová špička pro modelaci skvrn a dalších charakterizací.



MICERIUM S.p.A.

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)
Tel. (+39) 0185 7887 870 • Fax (+39) 0185 7887 970
e-mail: micerium@micerium.it • www.micerium.it

