



Nejdůležitější fakta ve zkratce:

Čtěte pozorně Microclean návod

Nikdy nepoužívejte více než 150 g leštících špendlíků a 150 ml vody.

Každá náhrada se musí čistit samostatně.

Během celého procesu čištění (za chodu systému) musí zůstat víko čisticí nádoby zavřené.

Abyste zabránili rotaci čisticí nádoby, vložte mezi jednotku a držák černé kádinky papírovou utěrku.

Při výměně čisticí kapaliny umístěte magnet na vnější stranu dna nádoby, čímž přidržíte špendlíky. Opláchněte špendlíky vodou.

Pokud jsou špendlíky špinavé nebo zašlé, čistěte je po dobu 30 minut v čisticí kapalině nebo je zcela vyměňte.

Všimněte si prosím systémové tabulky (viz zadní strana) a řiďte se jí !!!

Vyhněte se přímému kontaktu kapaliny s pokožkou a očima, protože je může podráždit.

čisticí kapalina (kyselá):

- **čištění zubních protéz, odstraňování usazenin a zubní kámen**
- **odstranění oxidů z drahocenných kovů**

čisticí kapalina (univerzální):

- **odstranění sádky z modelů titanu**
- **odstraňování oxidů z jiných než drahých kovů a titanu**