

SPECIFIKACE

Optishade je kolorimetr, optoelektronické zařízení které umožňuje měřit barvy v dentálním barevném prostoru. Optishade pracuje výhradně s iPhonem nebo iPadem (není součástí dodávky).

VELMI DŮLEŽITÉ: váš Optishade je zařízení s vyspělou technologií, s ním že třeba zacházet s největší opatrností. Na jakýkoli problém vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání vašeho Optishade se nevztahuje záruka [záruka: 1 rok].

Made for

 **iPod**  **iPhone**  **iPad**

| | |
|------------------|---|
| Rozměry jednotky | léčka 51 mm průměr 81,5 mm hmotnost 60 g |
| Funkce s iOS | iPhone, iPad a iPod Touch přichází s následujícími dvěma kabely: - světelný - USB |



#70100-05 - 04/2021



Smile Line SA
 Z.I. La Clef, 5
 CH-2610 St. Imier
 Switzerland
 +41 32 944 22 44
 mail@smileline.ch
 www.smileline.ch

Obsah

- Optishade kompletní jednotka s Capture vodicím kuželem a kalibrační krytkou
- 1 světelný kabel pro připojení Optishade/ iPhone-iPad – 1 USB nabíjecí kabel
- 4 záchytné vodicí kužely
- 4 kalibrační uzávěry
- 1 brožurka s návodem k použití a 1 stručný návod k použití
- Aplikace Optishade (zdarma ke stažení na Appstore)
- 30 denní bezplatná licence Matisse



NESTERILNÍ. VIZ SEKCE ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

VAROVÁNÍ! Uvnitř kalibračního uzávěru je umístěna kalibrační karta. Kalibrační karta je extrémně křehká a citlivá. V žádném případě byste se jí neměli dotýkat prsty a neriskovat, že ji ušpiníte. Kalibrační uzávěr nelze dezinfikovat ani sterilizovat. V případě, že si nejste jisti jeho čistotou nebo případně rizika křížové kontaminace, okamžitě jej zlikvidujte a vezměte nový.

VAROVÁNÍ! Každý komponent má pouze jednu montážní polohu. Pro dobré pochopení montážních principů se doporučuje toto trochu natrénovat.


VAROVÁNÍ! Nikdy se nepokoušejte otevřít základnu Optishade. Je zapečetěná a otevřením se ruší záruka výrobce. Dávejte pozor a neriskujte vniknutí jakékoli tekutiny dovnitř základny Optishade.

VAROVÁNÍ! Na jakékoli poškození způsobené vniknutím kapaliny do základny vašeho zařízení Optishade se nevztahuje záruka výrobce.


Stručný návod k použití



1. Plně nabijte jednotku

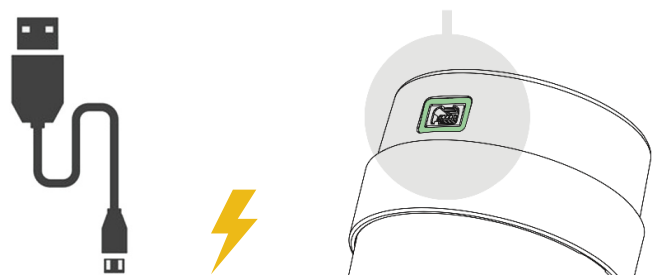

3. Připojte Optishade k zařízení iOS a postupujte podle pokynů aplikace

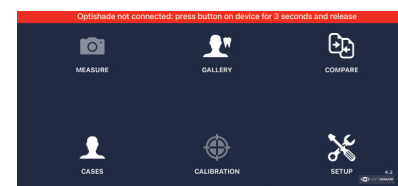

2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Optishade



4. Zkalibrujte, sejměte uzávěr a začněte měřit

